

Konec bezmocnému pláči, český vynález pomáhá dětem

31.3.2026 - | i117 MEDIA s.r.o.

Každá maminka to zná. Miminko neutišitelně pláče, propíná se v zádech, přitahuje nožičky k bříšku a vy víte, že ho trápí „prdíky“. Tříměsíční kolika dokáže potrápít nejen dítě, ale i celou rodinu. Na trhu se objevil unikátní český patent **RIOCATH BABY®**, který mění způsob, jakým můžeme našim nejmenším okamžitě a bezpečně ulevit.



Když masáže a kapičky nestačí

Nadýmání a nahromaděné plyny v trávicím traktu jsou u novorozenců a kojenců běžné. Jejich trávicí soustava se teprve vyvíjí a občas potřebuje pomoc „zvenčí“. Zatímco klasické rektální rourky, které znaly už naše babičky, fungovaly na principu prostého zasunutí (což může být pro citlivou sliznici miminka nepříjemné), **RIOCATH BABY®** na to jde úplně jinak – vědecky a přitom neuvěřitelně jemně.

[RIOCATH BABY®](#)

Světový unikát z českých rukou

Za tímto pomocníkem stojí více než 12 let výzkumu a 65 národních patentů. Klíčem je tzv. **mechanismus vybalování**. Co to v praxi znamená?

Při zavádění se dvouplášťová trubička rourky do konečníku nezasunuje (nedochází ke tření), ale jemně se „rozbaluje“ směrem dovnitř. Miminko tak zavedení prakticky vůbec necítí.

[RIOCATH BABY®](#)

5 důvodů, proč by **RIOCATH BABY®** neměl chybět v domácí lékárničce:

1. **Absolutní šetrnost:** Díky patentovanému mechanismu se rourka vybaluje do konečníku bez dráždění sliznice. Je to nejjemnější způsob, jaký moderní medicína nabízí.

2. **Okamžitá úleva:** Na rozdíl od kapiček, které musí projít trávicím traktem, rourka uvolní nahromaděný plyn okamžitě.
3. **Bezpečnost na prvním místě:** Maminky mívají často strach, aby rourku nezavedly příliš hluboko. [RIOCATH BABY®](#) má konstrukci, která vysune profil maximálně do délky 2,5 cm. Širší část rourky navíc brání tomu, aby se pomůcka „ztratila“ v rektu.
4. **Zvládnete to jednou rukou:** Každá maminka ví, že při manipulaci s neklidným miminkem potřebuje mít jednu ruku volnou. Tato rourka je navržena tak, aby šla snadno ovládat jen jednou rukou.
5. **Certifikovaná kvalita:** Nejedná se o obyčejnou plastovou trubičku, ale o certifikovaný zdravotnický prostředek splňující nejpřísnější normy ISO.

[RIOCATH BABY®](#)

Jak to funguje v praxi?

Použití je intuitivní. Jemným pohybem se aktivuje dvouplášťová trubička, která překoná anální svěrač a umožní plynům odejít. Celý proces trvá jen pár vteřin a výsledkem je spokojené a klidné miminko.

Více informací a instruktážní videa najdete na [riocath.cz](#). [riocathbaby.cz](#)